

# La perfecta combinación entre exterior e interior



 **SUNRISE  
MEDICAL**

**QUICKIE**

**Salsa®**

# QUICKIE®

Aug 23 Rev 2




## QUICKIE®



SILLA de **EXTERIOR**

**COMPACTA Y ADAPTABLE**

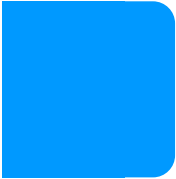

# QUICKIE®



## **SILLA DE EXTERIOR - Robusta**

- Estructura rígida
- Ruedas grandes ( 9" y 14")

## **DIMENSIONES MUY COMPACTAS – Maniobrabilidad en interiores**

- Altura de asiento al suelo más baja del mercado (desde 37 cm)
- Anchura de la base 58 cm con ruedas de 12", 61 cm con ruedas de 14"

## **COMPLETAMENTE AJUSTABLE- Adaptable al usuario y sus cambios**

- **Asiento único** fácilmente ajustable en anchura y profundidad entre 41 y 51 cm
  - Respaldo ajustable en anchura entre 41 y 51 y en altura en 3 posiciones
  - Reposabrazos abatibles, ajustables en altura, ángulo y profundidad, y unidos al respaldo, no a la estructura
  - Cuatro posiciones de basculación de asiento, centro de gravedad y altura asiento suelo, ajustables
- 

## Dimensiones muy COMPACTAS, para una perfecta maniobrabilidad en interiores



### Perfecto acceso a mesas:

- Altura mínima asiento al suelo **37cm**  
(con ángulo asiento 0° y ruedas 12")
- Altura asiento al suelo **38cm**  
(con ángulo asiento 0° y ruedas 14")

### Accesibilidad a ascensores:

La longitud total de la Salsa sin reposapiés es de tan sólo **80 cm**

37 cm (12")

38 cm (14")

80 cm sin repp



**Dimensiones muy COMPACTAS,**  
para una perfecta maniobrabilidad en interiores



## Accesibilidad por puertas estrechas:

- Anchura total de 58cm con ruedas de 12"
- Anchura total de 61cm con ruedas de 14"



58 cm (12")

61 cm (14")

# QUICKIE®



## Un único asiento ajustable a todas las tallas

Todos los ajustes del asiento que se indican a continuación pueden realizarse con solo llaves Allen de 3, 4, y 5mm, un destornillador y una llave inglesa de 10mm




# QUICKIE®



## Un único asiento ajustable a todas las tallas

Asiento ajustable en ANCHURA: 41, 43, 46, 48 y 51 cm

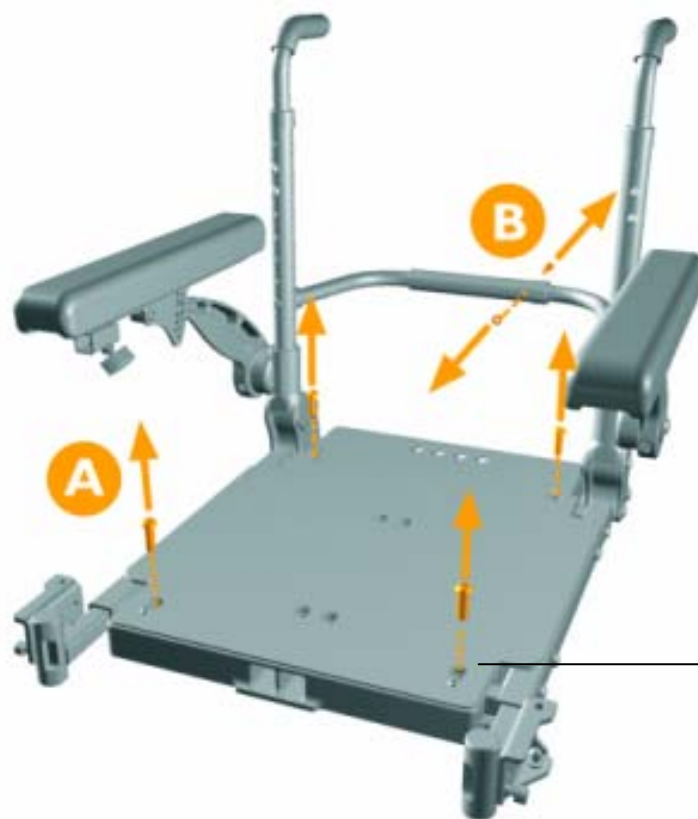

### Paso 1

- A. Soltar los 4 tornillos Allen de la base sólida
- B. Soltar el tornillo de la barra rigidizadora del respaldo




# QUICKIE®



## Un único asiento ajustable a todas las tallas

Asiento ajustable en ANCHURA: 41, 43, 46, 48 y 51 cm

### Paso 2

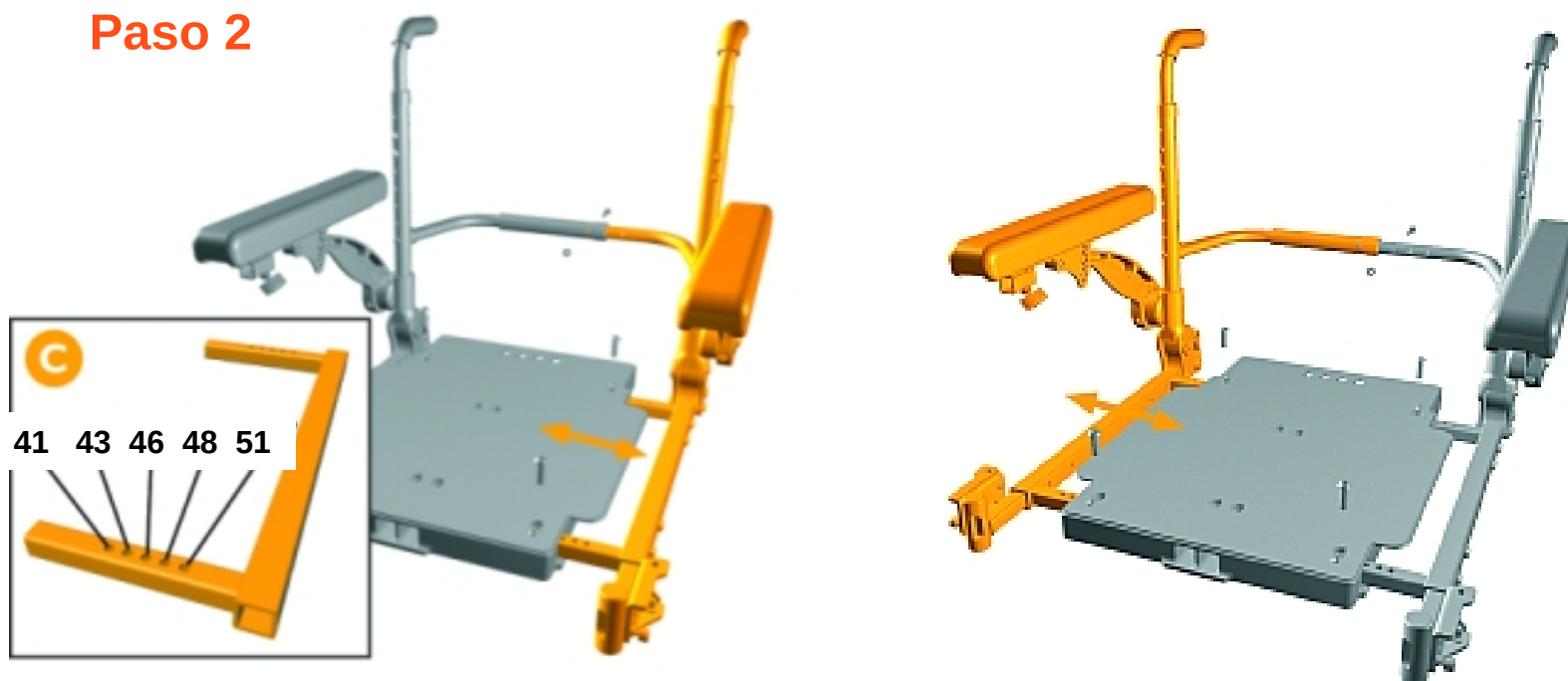

El ajuste además se puede hacer en ambos lados, o ajustando sólo uno de los lados, por lo que se puede alcanzar un mayor rango de anchuras (de 2 en 2 cm, o de 1 en 1 cm, para un ajuste perfecto al usuario)

# QUICKIE®



## Un único asiento ajustable a todas las tallas

Asiento ajustable en PROFUNDIDAD: 41, 43, 46, 48 y 51 cm

Paso 1



Soltar los 4 tornillos (2 por cada lado...)

Paso 2



Y deslizar hacia atrás el conjunto del respaldo (coloreado en naranja) hacia delante o atrás en función de la profundidad deseada

# QUICKIE®




## Un único asiento ajustable a todas las tallas

Respaldo ajustable en altura: 45.5, 48 y 50.5 cm



**Paso 1**

Soltar el tornillo del tubo superior del respaldo

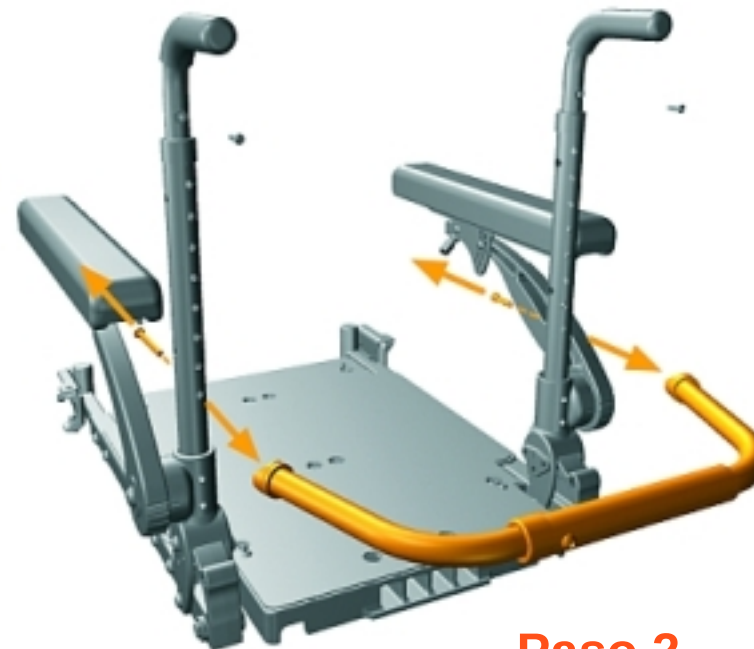

**Paso 2**

Soltar el tornillo que sujeta la barra rigidizadora a los tubos del respaldo

# QUICKIE®



## Un único asiento ajustable a todas las tallas

Respaldo ajustable en altura: 45.5, 48 y 50.5 cm



Soltar los dos tornillos delanteros del tubo inferior del respaldo




Ajustar a la altura deseada los tubos superiores del respaldo

# QUICKIE®



## Centro de gravedad, ángulo de asiento, y altura de asiento a suelo ajustables


Centro de gravedad ajustable para conseguir el balance correcto de pesos p.e. En usuarios amputados

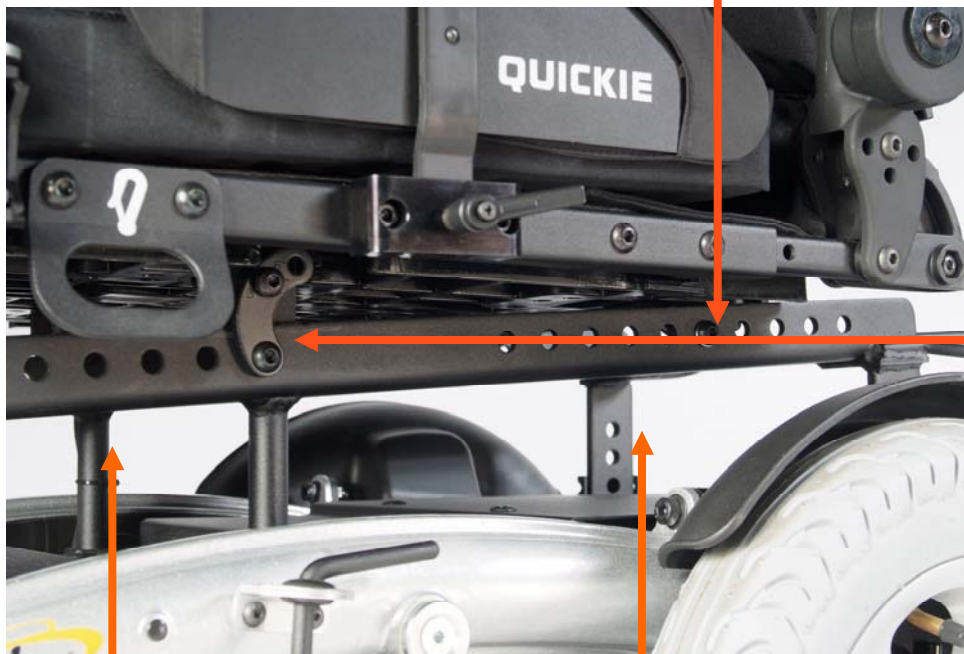

Basculación manual (ángulo asiento) ajustable en 4 posiciones: 0°, 3°, 6°, y 9°

Ajuste de altura de asiento a suelo en 5 posiciones

## Respaldo ajustable en ángulo en 6 posiciones (reclinación)

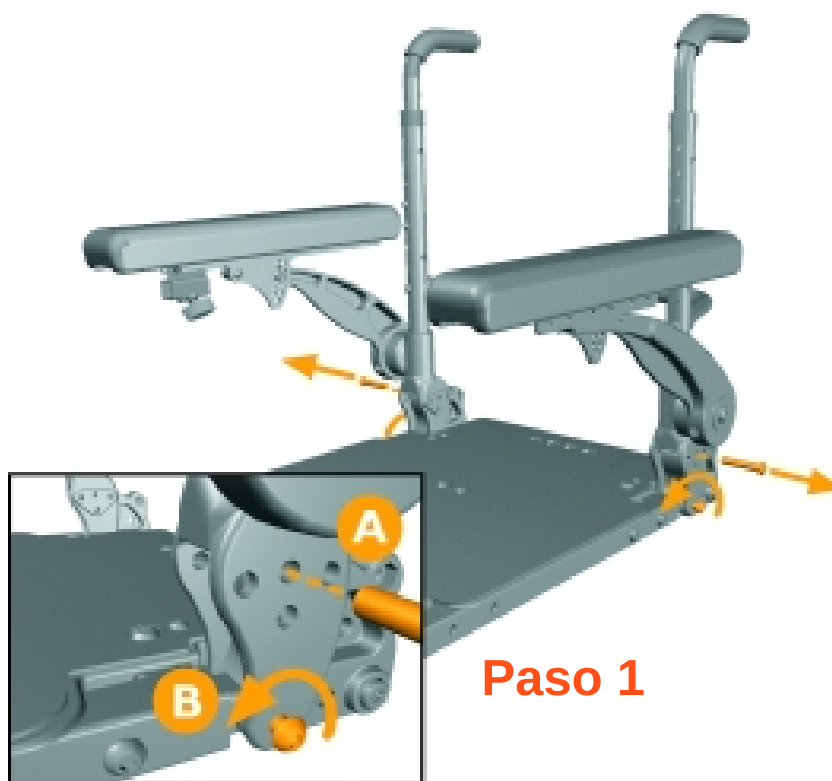

**Paso 1**


Soltar el tornillo A. Aflojar el tornillo B en el sentido que se indica en el dibujo



**Paso 2**






Girar el conjunto del respaldo hacia al posición deseada

## Respaldo ajustable en ángulo en 6 posiciones (reclinación)

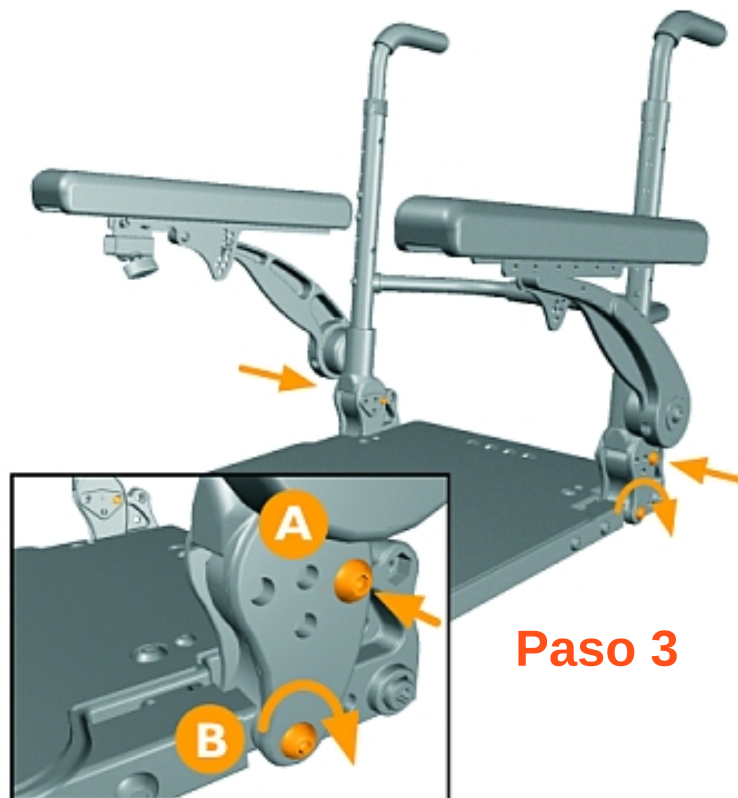

Colocar de nuevo el tornillo A en el orificio que corresponda con el ángulo de respaldo elegido.  
Apretar de nuevo el tornillo B para fijar la posición

Guía de las posiciones del tornillo para conseguir los distintos ángulos del respaldo

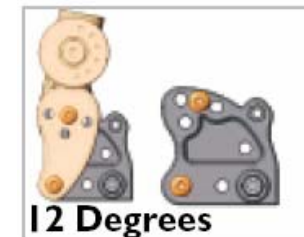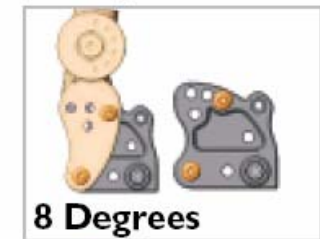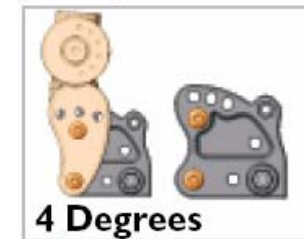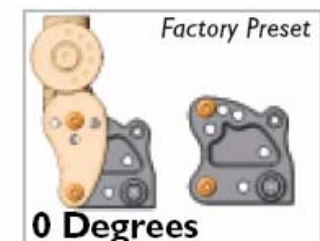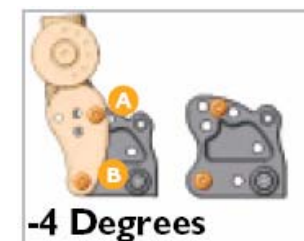

## Reposabrazos ajustables en altura



**Paso 1**

Soltar el tornillo central  
que libera el  
reposabrazos



**Paso 2**

Retirar el reposabrazos.  
Soltar los dos tornillos de  
la pieza interior  
redondeada





**Paso 3**

Girar la pieza redondeada para  
conseguir una mayor o menor  
altura del reposabrazos

Si se ha modificado la altura del reposabrazos, conviene re-ajustar el ángulo del almohadillado para que este permanezca a 90° con respecto al respaldo

Aflojar el tornillo A girándolo hacia delante, y retirar el tornillo B

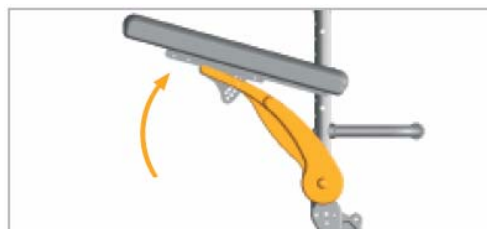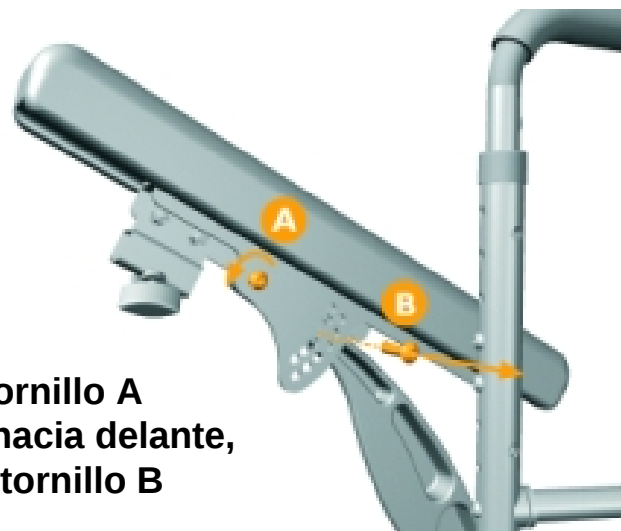

x.e. si se sube la altura del reposabrazos, habría que disminuir el ángulo del almohadillado con respecto al respaldo

## Reposabrazos ajustables en ángulo




Gire los tornillos A y B para conseguir el ángulo deseado

## Almohadillado regulable en profundidad



Soltar los dos tornillos E.

El almohadillado queda libre pudiéndolo ajustar en profundidad haciendo coincidir de nuevo los tornillos con los orificios A,B,C,D.

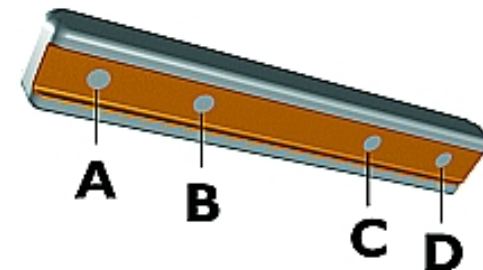

# QUICKIE®




## Reposapiés ajustables en profundidad (+2.5, +5, +7.5cm)

### Paso 1



Soltar los dos tornillos del tubo del asiento

### Paso 2

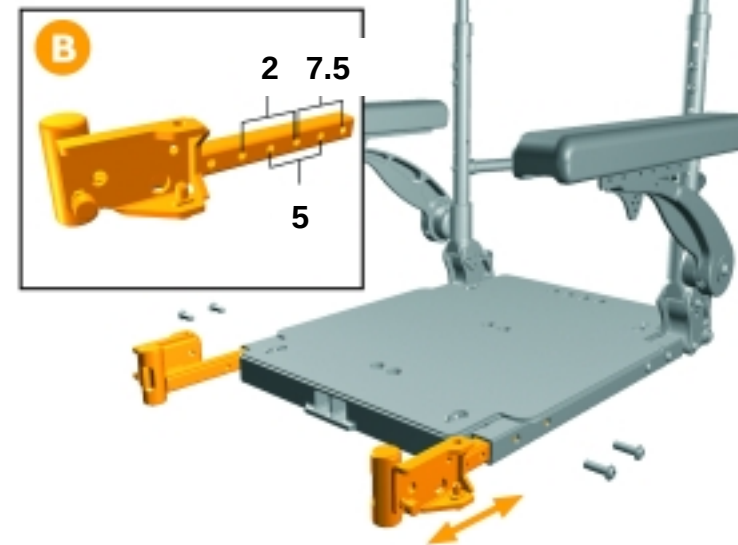



Deslizar hacia fuera los tubos en los que van anclados los reposapiés

## Transferencias fáciles de realizar



- Reposabrazos abatibles y reposapiés desmontables
- La altura de asiento al suelo reducida facilita enormemente las transferencias
- Los soportes de anclaje de los reposapiernas son planos, para no molestar en las transferencias

## Cómodo acceso a las baterías

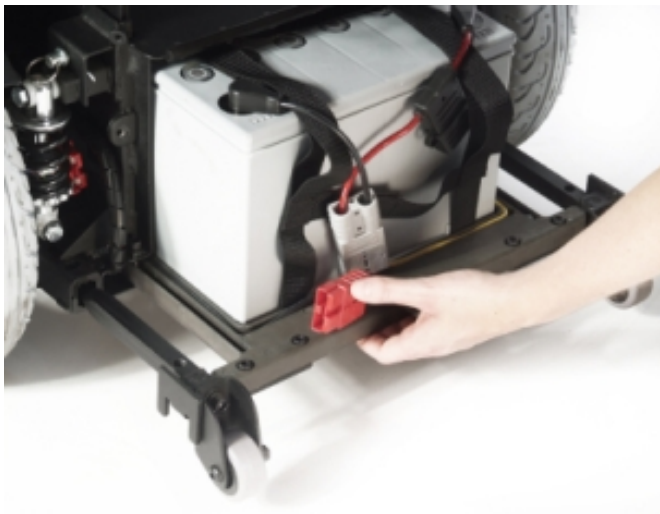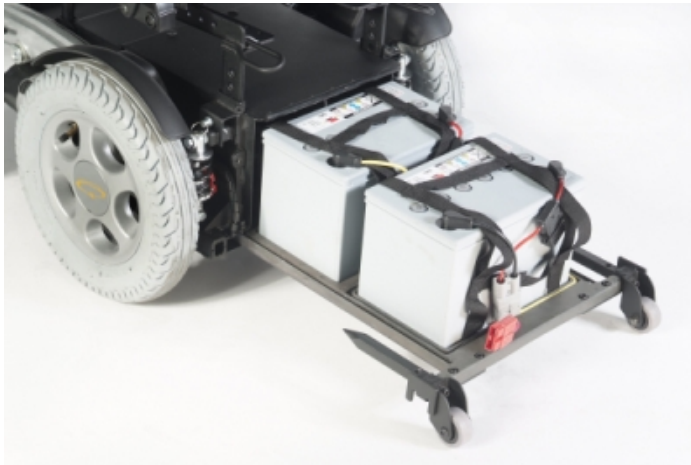

- El acceso a las baterías se realiza por detrás sin nada que interfiera, incluso con el usuario sentado en la silla.
- Las baterías están colocadas sobre una bandeja deslizante con ruedas para acceder a ellas y volver a colocarlas sin esfuerzo

## Comodidad y seguridad



Suspensión ajustable para una conducción más cómoda




- Puntos de anclaje para el transporte en vehículos
- Crash Tested
- Puede acceder a vehículos subiendo por rampas dobles con anchura de r il de 23 cm

## Caja de control y cableado protegidos



- Protección de la caja de control contra el agua y el polvo.

- Cableados cubiertos

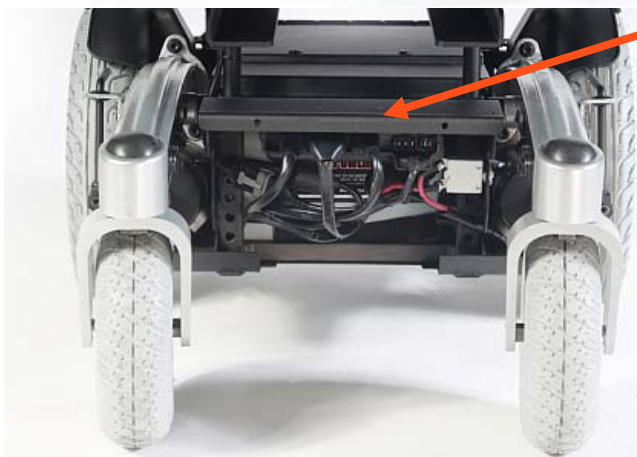

# QUICKIE®



## Eficaz para la conducción en exteriores



**Subebordillos (opcional) que permite sortear obstáculos y superar bordillos**

- **Con ruedas de 12" y subebordillos: hasta 8.5 cm**
- **Con ruedas de 14" y subebordillos: hasta 10 cm**

## Mandos:



- VR2 es el mando estandard, preparado para dos opciones eléctricas.
- Posibilidad de controlar hasta 4 opciones eléctricas añadiendo la caja de control de 4 pulsadores
- VR2 para usuario y acompañante

## Opciones:



**Elevación eléctrica**



**Elevación y basculación eléctrica**



**Asiento, respaldo y cabecero Comfort**

## Otras:

- Respaldo reclinable eléctrico
- Reposapiés elevables eléctricos
- Reposapiés elevables manual
- Luces e indicadores
- Velocidad de 10 Km/h
- Ruedas macizas...



# QUICKIE®



- La perfecta combinación entre exterior e interior

Robusta y compacta

- Un único asiento ajustable a todas tallas

Con una sola silla en stock podrá servicio a una gran variedad de usuarios

Ahorre stock y mejore el servicio a su cliente

- Fácil de configurar a las necesidades del usuario

- Fácil mantenimiento